

Einrichten der MiniMed™ Mobile App

Herunterladen der MiniMed™ Mobile App

Suchen Sie auf Ihrem Mobilgerät im Apple™ App Store™ oder Google Play™ Store nach der MiniMed™ Mobile App. Laden Sie die App herunter. Dieses Produkt darf ausschließlich mit unterstützten Mobilgeräten genutzt werden. Angaben zu den unterstützten Geräten und Betriebssystemen finden Sie auf Ihrer landesspezifischen Website von Medtronic.

Erstmaliges Öffnen der MiniMed™ Mobile App

1. Tippen Sie auf Ihrem kompatiblen Mobilgerät auf das Symbol der **MiniMed™ Mobile App**.



2. Die folgenden Bildschirmseiten enthalten Informationen zur Funktionsweise der App. Nachdem Sie jede Seite gelesen haben, tippen Sie auf **Weiter**.

Anmelden bei der CareLink™ Software

Der Anmeldebildschirm für das CareLink™ Konto erscheint.

Das kompatible Mobilgerät muss mit dem Internet verbunden sein und die Bluetooth™ Funktion aktiviert haben, um sich mit einem CareLink™ Konto synchronisieren zu können.

Wenn Sie ein CareLink™ Konto haben:

1. Wählen Sie Ihr Land aus.
2. Tippen Sie auf **Anmelden**.
3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das zugehörige Passwort für das CareLink™ Konto ein.
4. Tippen Sie auf **Anmelden**.

Wenn Sie kein CareLink™ Konto haben:

1. Wählen Sie Ihr Land aus.
2. Tippen Sie auf **Konto erstellen**. Ein Fenster mit Anweisungen, wie Sie sich für ein CareLink™ Konto registrieren können, erscheint.
3. Folgen Sie den Anweisungen und registrieren Sie sich für ein CareLink™ Konto.
4. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das zugehörige Passwort für das CareLink™ Konto ein.
5. Tippen Sie auf **Anmelden**.

Einrichten der MiniMed™ Mobile App

1. Lesen Sie die Endnutzer-Lizenzvereinbarung, wenn sie erscheint.
2. Tippen Sie auf **Stimme zu**. Auf dem Bildschirm erscheint eine Bestätigungsmeldung.
3. Zur Bestätigung, dass Sie der Endnutzer-Lizenzvereinbarung zustimmen, tippen Sie auf **Stimme zu**.

Ein Bildschirm, der die notwendigen Schritte zum Einrichten der App anzeigt, erscheint. Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf **Jetzt beginnen**, um die App einzurichten.