



Gerätetreiber installieren

LibreView erfordert einmalig das Herunterladen und Installieren einer Gerätetreiberdatei, die erkennt, wenn ein kompatibles Glukosemessgerät angeschlossen ist. Achten Sie darauf, die jeweils aktuelle Version Ihres Internet-Browsers zu verwenden, wenn Sie den Download starten.

1. Klicken Sie auf dem „Hochladen“-Bildschirm unter „Messgerätedaten hochladen“ auf die Schaltfläche „Zum Hochladen auswählen“
2. Klicken Sie in dem eingeblendeten Fenster auf die für Ihr Betriebssystem gültige Schaltfläche „Herunterladen“
3. Warten Sie, bis die Datei auf Ihren Computer heruntergeladen wurde.
4. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei, indem Sie darauf klicken und ihre Ausführung zulassen
5. Folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um die Installation abzuschließen

Hinweis: Die heruntergeladene Datei erscheint bei Nutzern von Chrome und Internet Explorer unten und bei Nutzern von Firefox und Safari oben rechts im Bildschirm. Wenn Sie nicht Ihren persönlichen Computer verwenden, benötigen Sie für den Download und die Installation eventuell die Genehmigung Ihres IT-Administrators.

Links zu den neuesten LibreView-Gerätetreibern finden Sie auch auf der LibreView-Support-Website. Suchen Sie nach dem Thema „Installieren der LibreView-Gerätetreiber“ und befolgen Sie die Anweisungen zum Herunterladen und Installieren der Treiber.



Hochladen aus Apps

Um Daten aus FreeStyle LibreLink-Apps in LibreView hochzuladen, sind die LibreView-Gerätetreiber nicht erforderlich. Wenn Sie nur Daten mit der FreeStyle LibreLink-App hochladen, müssen Sie die Treiber nicht installieren.



Hochladen von einem USB-Gerät

Nachdem Sie die Gerätetreiber erfolgreich heruntergeladen und installiert haben, können Sie mit dem entsprechenden Kabel ein kompatibles Gerät anschließen und mit dem Hochladen von Daten beginnen.

Dinge, die vor dem Hochladen zu beachten sind:

- LibreView ist nur mit Geräten von Abbott Diabetes Care kompatibel.
- Achten Sie darauf, dass die Batterie/der Akku des Geräts aufgeladen ist und der Bildschirm des Geräts den Computermodus anzeigt, wenn dieses mit einem USB-Anschluss verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das passende USB-Kabel für Ihr Gerät haben. Ein Kabel, das für ein anderes Gerät vorgesehen ist, funktioniert möglicherweise nicht.

Hochladen von einem USB-Gerät:

1. Schließen Sie Ihr kompatibles Gerät mit einem geeigneten Kabel an einen USB-Anschluss an Ihrem Computer an.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zum Hochladen auswählen“
3. Nach dem Hochladen der Daten öffnen sich die Berichte automatisch
4. Sobald die Daten hochgeladen sind, können Sie sie jederzeit im Bereich „Meine Glukose“ anzeigen, indem Sie auf „Glukose-Berichte“ klicken.

Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal Daten von einem Gerät hochladen, müssen Sie eventuell Ihrem Browser den Zugriff auf die Gerätetreiberdatei gestatten. Sparen Sie Zeit, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren, damit sich Ihr Browser Ihre Auswahl merkt, bevor Sie „Zulassen“ oder „Anwendung starten“ wählen.

Hinweis: Wenn Ihr Arzt LibreView verwendet, kann auch er während Ihrer Termine Daten von Ihrem Gerät hochladen.