

# Auslesen des MiniMed<sup>®</sup> Systems mit **CareLink<sup>™</sup> Personal**

Medtronic

## Erstellen Sie Ihr Konto für die CareLink<sup>™</sup> Software

1. Besuchen Sie unsere Webseite unter [www.carelink.minimed.eu](http://www.carelink.minimed.eu)
2. Wählen Sie unter Anmelden zu CareLink<sup>™</sup> Personal Land „**Österreich**“ aus und gehen Sie auf „**Weiter**“ (Sie haben sich bereits einen persönlichen Benutzernamen und Passwort vergeben) oder „**Konto erstellen**“ (zur erstmaligen Vergabe eines persönlichen Benutzernamen und Passwortes)

Medtronic

WILLKOMMEN BEI DER CARELINK<sup>™</sup> PERSONAL

THERAPIEMANAGEMENT-SOFTWARE FÜR DIABETES.

Dieses webbasierte System ist dazu ausgelegt, Informationen aus allen Ihren Tools zum Diabetes-Management – Ihrer Insulinpumpe, Ihrem System für die kontinuierliche Glukosemessung, Ihrem/Ihren Blutzuckermessgerät(en) und Ihrem Tagebuch – in leicht zu lesenden Diagrammen, Kurven und Tabellen darzustellen. Diesen Berichten können Sie und Ihr Diabeteszentrum Trends und andere Informationen entnehmen, anhand derer Sie eine bessere Diabeteskontrolle und damit eine Verbesserung der Behandlung erzielen können.

Land Österreich

Sprache Deutsch

Weiter

Passwort vergessen?

oder

Konto erstellen

3. Steigen Sie mit Ihrem persönlichen **Benutzernamen** und **Passwort** bei Care Link<sup>™</sup> ein

Anmelden zu  
CareLink<sup>™</sup>  
ÖSTERREICH

Benutzername

Passwort

Anmelden

Passwort vergessen?

## Zustimmung der Nutzungsbedingungen

CareLink™

ERNEUT ZUSTIMMEN

1. Einwilligungserklärungen

[Abbrechen](#)

### Nutzungsbedingungen für CareLink™ Personal

Bitte lesen Sie die [Nutzungsbedingungen](#) für CareLink™ Personal und stimmen Sie ihnen zu. Sie müssen den [Nutzungsbedingungen](#) zustimmen, um diese Website verwenden zu können.

Sie können die [Nutzungsbedingungen](#) für CareLink™ Personal jederzeit auf dieser Website und auf der Anwendung für Mobilgeräte aufrufen. In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie die [Nutzungsbedingungen](#) so oft Sie möchten durchlesen, vor allem, wenn Sie sich erstmals dafür entscheiden CareLink™ Personal zu nutzen.

Bei der Nutzung von CareLink™ Personal verarbeitet Medtronic Ihre personenbezogenen Daten (einschließlich Gesundheitsdaten) in Übereinstimmung mit der [Datenschutzerklärung](#).

Ich wohne in Österreich. Ich habe die [Nutzungsbedingungen](#) für CareLink™ Personal gelesen und erkläre mich damit einverstanden.


JA  
 NEIN

[Weiter >](#)

## Einmalige Vorbereitung für die übersichtliche Berichterstellung

Nachfolgende Einstellungen sind **Vorschläge**. **Sprechen** Sie diese bitte **mit** Ihrem **Diabeteszentrum ab**.

Wählen Sie rechts oben „**Voreinstellungen**“ aus

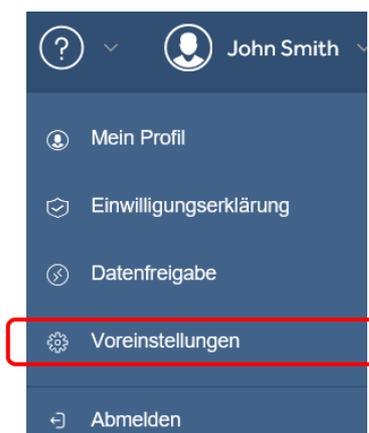

Passen Sie die folgenden drei Bereiche (Glukose; Kohlenhydrate; Berichtsdaten) wie nachstehend abgebildet an (Vorschlag)

## Voreinstellungen Aktualisieren

### Glukose

Maßeinheit für Blutzucker- und Glukosewerte mg/dl mmol/l

**Ziel-Glukose**

Niedrigster Grenzwert (mg/dl)	Niedrig (mg/dl)	Hoch (mg/dl)	Höchster Grenzwert (mg/dl)
54	70	180	250

### Kohlenhydrate

KH-Einheiten Gramm Berechnungseinh.

Kohlenhydrat-Umrechnungsfakt...  
12.0

Gramm entsprechen einer Berechnungseinheit

Zeitformat 12 Std. 24 Std.

### Berichtsdaten

MAHLZEITEN ANALYSEZEITRÄUME VOREINSTELLUNGEN FÜR DATENQUELLEN

**Zeitraum**

<b>Frühstück</b>	<b>Mittagessen</b>
Von 06:00 Bis 07:00	Von 12:30 Bis 14:00
<b>Abendessen</b>	<b>Nachts</b>
Von 18:30 Bis 20:00	Von 23:00 Bis 06:00

**Analyseparameter** Alle Mahlzeiten Pro Mahlzeit

#### Frühstück

<b>BZ-Zielwert (präprandial)</b>	<b>BZ-Zielwert (postprandial)</b>
Niedrig (mg/dl) 70 Hoch (mg/dl) 140	Niedrig (mg/dl) 70 Hoch (mg/dl) 140
<b>Analysezeitraum (präprandial)</b>	<b>Analysezeitraum (postprandial)</b>
Von (Std.) 01:00 Std.	Von (Std.) 01:00 Std. Bis (Std.) 03:00 Std.

#### Mittagessen

#### Abendessen

Übernehmen Sie für Ihr Mittag- und Abendessen die Einstellungen des Frühstücks (Vorschlag)

Passen Sie die Einstellungen für die Nacht wie folgt an (Vorschlag)

Nachts

BZ-Zielwert (präprandial)      BZ-Zielwert (postprandial)

Niedrig (mg/dl)	Hoch (mg/dl)	Niedrig (mg/dl)	Hoch (mg/dl)
100	150	100	150

Analysezeitraum (präprandial)      Analysezeitraum (postprandial)

Von (Std.)	Von (Std.)	Bis (Std.)
01:00 Std.	01:00 Std.	03:00 Std.

Bestätigen Sie Ihre Änderungen der Voreinstellungen rechts oben mit [Aktualisieren](#). Somit sind Ihre Änderungen gespeichert.

**Voreinstellungen**

Glukose

[Aktualisieren](#)

## Einmalige Installation des CareLink™ Uploaders

Gehen Sie rechts oben auf das Symbol  und wählen Sie „So installieren Sie den Uploader“.



## So installieren Sie den Uploader

Der CareLink™-Uploader muss einmal auf jedem Computer installiert werden.

Mit dem CareLink™-Uploader können Sie Daten von Diabetes-Geräten hochladen.

### So installieren Sie den CareLink™-Uploader

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie auf dem Computer, auf dem Sie die Anwendung installieren möchten, über Administratorrechte verfügen.
2. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um den CareLink™-Uploader herunterzuladen.

[↓ Installationsprogramm für CareLink™-Uploader herunterladen](#)

3. Führen Sie das heruntergeladene Programm aus, um den CareLink™-Uploader zu installieren.
4. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen, um die Installation abzuschließen.


Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an die Produkthotline von Medtronic 0820 820 190 oder Ihren zuständigen Repräsentanten.

 CareLinkUploader-...exe

(Für detaillierte Hinweise: Installationsanleitung CareLink™ Install Guide)

## Beginnen Sie mit dem Auslesen Ihres MiniMed® Systems

Bestätigen Sie „**Jetzt hochladen**“ und folgen Sie zum Auslesen Ihrer Insulinpumpe den Schritten des Programms

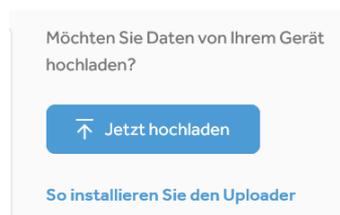


(Für detaillierte Hinweise: Installationsanleitung CareLink™ Install Guide)

Sie erhalten eine Meldung, wenn das Auslesen abgeschlossen ist. Bestätigen Sie diese mit „**Beenden**“.


## Wählen Sie Ihr gewünschtes Berichtspaket aus

Nachfolgende Einstellungen sind ein **Vorschlag**. **Sprechen** Sie diese bitte **mit** Ihrem **Diabeteszentrum ab\***. Wählen Sie den Reiter „**Berichte**“ aus:

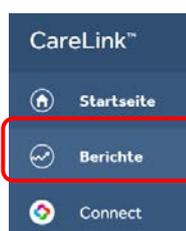

## Berichte

Berichte erstellen

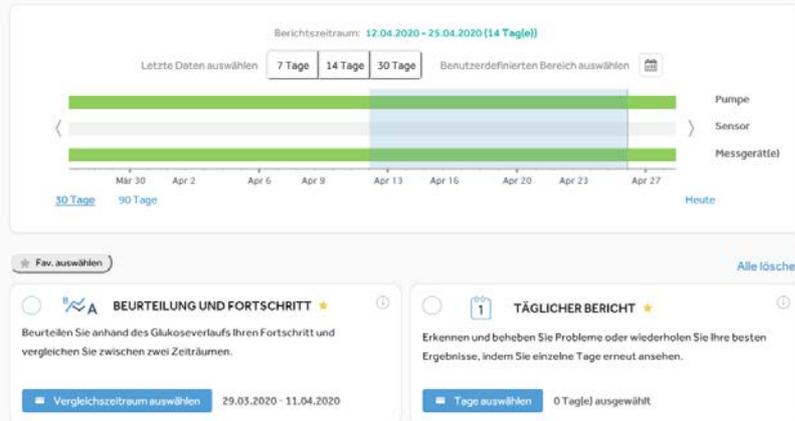

Wählen Sie folgende Berichte aus – ausgewählter Bericht wird grün hinterlegt\*  
Tipp: durch Anklicken des Sterns  speichern Sie Ihr gewünschtes Berichtspaket

Bericht:  Beurteilung und Fortschritt

Vergleichszeitraum auswählen

Fortschritt vergleichen seit:  1  2  3 Woche(n)

Bestätigen Sie:

Bericht:  Täglicher Bericht

Bestätigen Sie:

Wählen Sie die vorgeschlagenen aktuellsten **14** Tage aus




Bestätigen Sie:

**Weiter**

Wählen Sie folgende Berichte aus – ausgewählte Berichte werden grün hinterlegt\*

Tipp: durch Anklicken des Sterns speichern Sie Ihr gewünschtes Berichtspaket

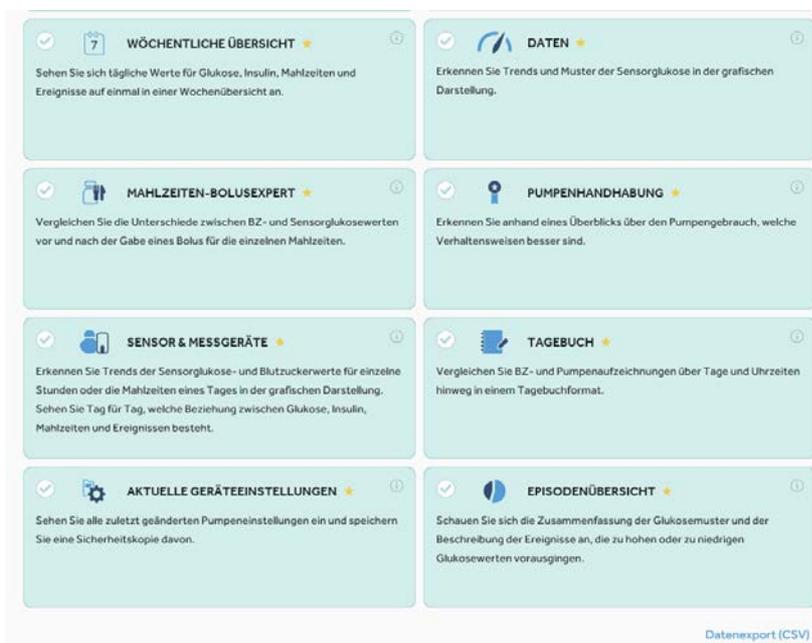

Nach Ihrer gewünschten Auswahl bestätigen Sie rechts oben

**Berichte erstellen**

und fertig ist Ihr aussagekräftiges Berichtspaket für Ihre Datenanalyse und ambulanten Kontrolltermin.

Sie können Ihre Berichte im pdf Format abspeichern und/oder Ihrem behandelnden Arzt zukommen lassen.

Woite Wolfgang 2....pdf

abspeichern und/oder Ihrem behandelnden

Für technische Hilfestellungen mit dem CareLink™ Personal Programm stehen Ihnen unsere Medtronic Product Support Mitarbeiter unter Tel 0800 677 163 Mo bis Fr. 8:00 – 17:00 Uhr zur Verfügung.

Weitere Information finden Sie unter [www.medtronic-diabetes.at](http://www.medtronic-diabetes.at)

Folgen Sie uns und verpassen Sie keine Neuigkeiten!



[www.facebook.com/medtronicdiabetesoesterreich](https://www.facebook.com/medtronicdiabetesoesterreich)



[www.instagram.com/medtronicdiabetesaustria](https://www.instagram.com/medtronicdiabetesaustria)