

Teilen Sie Ihre Glukosewerte<sup>1</sup>  
ganz einfach mit Ihrem Arzt.



## FreeStyle LibreLink

**Verbinden Sie sich über die FreeStyle LibreLink App<sup>2</sup> mit einer Praxis.**

Das Verbinden mit einer Arztpraxis ist eine Funktion von FreeStyle LibreLink, die Sie ganz einfach Ihre Glukosewerte über LibreView<sup>3</sup> mit Ihrer behandelnden Praxis teilen lässt.



## LibreView

**Erhalten Sie wertvolle Einblicke in Ihre Glukosewerte und Trends.**

Ihre Glukosewerte werden automatisch in LibreView hochgeladen.<sup>1</sup> LibreView ist ein webbasiertes Diabetesmanagement-System, das Ihnen und Ihrem Arzt Einblicke in verständliche Berichte und wertvolle Analysen zu Ihren Messwerten bietet.<sup>2,3</sup>



## Profitieren Sie von FreeStyle LibreLink<sup>2</sup> und LibreView<sup>3</sup>.



### Einfach verbinden

Verbinden Sie sich über die FreeStyle LibreLink App einfach mit Ihrer behandelnden Praxis.




### Automatisch Daten teilen<sup>4</sup>

Einmal verbunden, werden Ihre Glukosewerte automatisch mit dem LibreView-Konto Ihres Arztes geteilt.



### Bessere Arztbesuche

Ihr Arzt erhält wertvolle Einblicke in Ihre Messwerte, die ihn bei fundierten Therapieentscheidungen unterstützen.

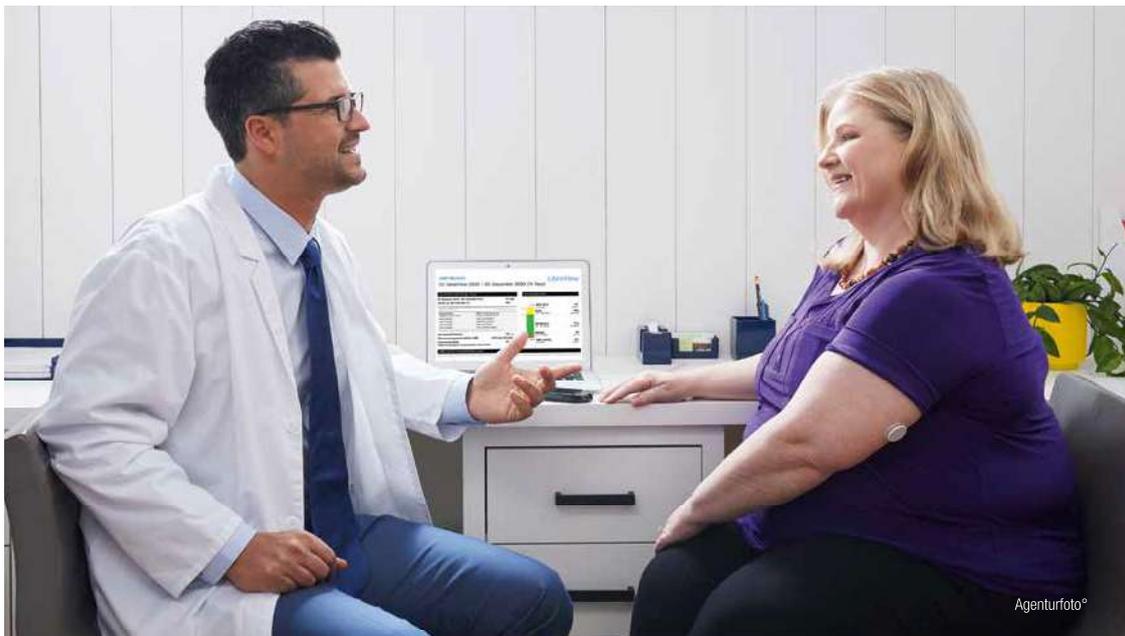

## OPTION 1:

Starten Sie das Teilen Ihrer Glukosewerte<sup>1</sup> mit der FreeStyle LibreLink App<sup>2</sup>.

Verbinden Sie sich mit Ihrem Arzt, bzw. AKH Kinderlinik:


# AKHKikli

Praxis-ID .....


Schritt für Schritt: So verbinden Sie sich mit Ihrer Praxis.



Tippen Sie auf «Menü».

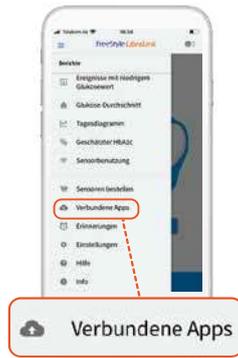

Gehen Sie zu «Verbundene Apps».

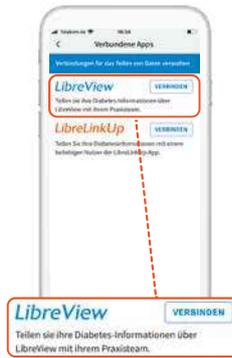

Wählen Sie «LibreView» aus.



Tippen Sie auf «Mit einer Praxis verbinden».



Geben Sie die Praxis-ID ein.

Tippen Sie auf «Weiter» und dann auf «Verbinden», nachdem Sie die Kontaktinformationen Ihres Arztes überprüft haben.

## OPTION 2:

### Ihr Arzt sendet Ihnen eine Einladung zum Teilen Ihrer Glukosewerte<sup>1</sup>.

#### Akzeptieren Sie die Praxiseinladung.


Ihre behandelnde Praxis wird Ihnen eine Einladung senden, damit Sie Ihre Glukosewerte teilen können. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie die Einladung akzeptieren können:

- Sie akzeptieren die Einladung direkt in der FreeStyle LibreLink App<sup>2</sup>
- oder Sie klicken in der Einladungsmail auf «**Einladung annehmen**».

#### Schritt für Schritt: So akzeptieren Sie eine Praxiseinladung in der FreeStyle LibreLink App.



Tippen Sie auf «**Menü**».

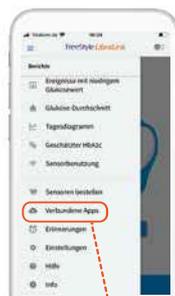

Verbundene Apps

Gehen Sie zu «**Verbundene Apps**».



LibreView  
Teilen sie ihre Diabetes-Informationen über LibreView mit Ihrem Praxisteam.

Wählen Sie «**LibreView**» aus.



OFFENE EINLADUNGEN

sense&image GmbH

Tippen Sie auf «**Offene Einladungen**».



AKZEPTIEREN

Tippen Sie auf «**Akzeptieren**», um die Einladung anzunehmen.